

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto	Mascarilla KN95
Fabricante	Guangdong Kangmei Saitary Products Co., Ltd No. 26 East Auxiliary Road, West Second Ring Road LePing Town, Sanshui District, Foshan City (China)
Contenido	2 unidades
Composición	Tela soplada por fusión electrostática, tela no tejida PP, algodón con filtro electrostático.
Condiciones de uso	Un solo uso
Instrucciones de uso	<p>Coger la mascarilla con una mano. La pieza metálica para ajustar la máscara a la nariz debe mirar hacia afuera.</p> <p>Colocar la máscara alrededor de la nariz. Boca y barbilla deben quedar cubiertas y la pieza de la nariz debe quedar sobre el puente de la nariz.</p> <p>Coger la goma inferior con la otra mano, pasarla por la cabeza y colocarla en el cuello, bajo las orejas.</p> <p>Coger la goma superior y colocarla por encima de las orejas. Colocar un dedo en cada extremo de la pieza metálica de la parte superior de la máscara y presionar.</p> <p>Mover y presionar los dedos bajando ambos extremos de la pieza desde el medio, moldeándola y ajustándola al puente de la nariz.</p>
Advertencia y precauciones	<p>Desechar la mascarilla de un solo uso después de usarla y tirarla a la basura.</p> <p>No usar la mascarilla si está húmeda, amarillenta o mohosa.</p> <p>No tocar el interior de la mascarilla mientras se está usando.</p> <p>Usar tan pronto sea posible una vez abierto el paquete.</p>
Conservación	Mantener en un lugar con humedad relativa inferior al 80%, sin presencia de gases corrosivos y con buena ventilación.
Estándar de referencia	GB2626-2006 EN149:2001+A1:2009
Caducidad	3 años